

User

<u>Kurzbedienungsanleitung</u>



Java

Download der Software "GlucoLog"

Kostenloser Download der Software unter "www.menarinidiagnostics.at". Für den Downloadlink klicken Sie bitte zuerst auf

- "Produkte", gefolgt von

 - "Blutzuckermessung",
 - "GlucoLog Software", und zuletzt
 - "GlucoLog Download Area". Nun sollten Sie folgendes Fenster sehen (siehe Abb. 1)



Abb. 1

Welche Version benötige ich?

Um die Daten Ihres Blutzuckermessgeräts mit GlucoLog verwalten zu können, benötigen Sie ein Datenkabel. Bestellen Sie dieses bitte unter "Bestellen Sie Ihr USB Kabel" (siehe Abb. 1) oder unter 01/804 15 76-0.

Die neueste Vollversion von GlucoLog laden Sie unter dem Menüpunkt "GlucoLog download" (siehe Abb. 1) auf Ihren Computer. Wählen Sie dazu "GlucoLog download", scrollen Sie das Fenster ganz herunter und klicken Sie auf den Schriftzug "Download Software GlucoLog", welcher unter dem schwarzen Trennstrich steht. Downloads dieser Kategorie setzen voraus, dass GlucoLog noch nicht auf Ihrem Computer installiert wurde (auch keine ältere Version) bzw. vor einer neuen Installation korrekt deinstalliert wurde. Um eine ältere Version von GlucoLog zu deinstallieren wählen Sie bitte

- "Start"/"Windows-Logo" oder drücken Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur
- "Systemsteuerung"
- "Software" (WinXP) oder "Programme und Funktionen" (Vista)

Anschließend "GlucoLog" wählen und auf "deinstallieren" klicken.

Ist bereits eine Version auf Ihrem Computer installiert, so wählen Sie bitte "Software Updates" (siehe Abb. 1). Mit Downloads aus dieser Kategorie können Sie eine ältere Version von GlucoLog auf die neueste Versionsnummer bringen, ohne eine alte Version vorher deinstallieren zu müssen.

Installation der Software

Windows XP: Starten Sie die Installation von GlucoLog, indem Sie zunächst doppelt auf die zuvor geladene Datei "GlucoLog.zip" klicken. Nun öffnet sich ein Fenster, klicken Sie bitte abermals auf folgenden Dateinamen "GlucoLog.exe". Die Installationsroutine startet nun.

Windows Vista: Starten Sie die Installation von GlucoLog, in dem Sie zunächst die Datei "GlucoLog.zip" entpacken. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste einmal auf "GlucoLog.zip". Es erscheint ein Auswahlfenster, in dem Sie bitte "Entpacken" oder "Extrahieren" wählen. Starten Sie die Installation, indem Sie mit der rechten Maustaste auf "GlucoLog.exe" klicken und "Als Administrator ausführen" wählen. (Hinweis: Unter Vista ist es ebenfalls möglich, GlucoLog direkt aus der ZIP-Datei zu installieren, es kann allerdings zu Problemen mit Zugriffsberechtigungen kommen. Um dies zu umgehen, starten Sie die Installation bitte wie empfohlen).

In dem erscheinenden Dialogfenster ist "Deutsch (Deutschland)" voreingestellt. Ändern Sie dies bitte in "Deutsch (Österreich)" (siehe Abb. 2). Um über unsere kostenlose Hotline Support bzgl. GlucoLog zu erhalten, muss die österreichische Sprachversion zwingend aktiviert sein. Bestätigen Sie das Lizenzabkommen mit "Annehmen" und klicken dann auf "Weiter". Nun können Sie das Installationsverzeichnis für GlucoLog auswählen.

GlucoLog:	Application Language
ø	Please select a language.
	Deutsch (Österreich) 🔹
	OK Cancel

Abb. 2

Bei der Frage zu der gewünschten Maßeinheit Ihrer Blutzuckermesswerte wählen Sie in Österreich bitte "mg/dL".

Nun startet die Installation der Software. Bestätigen Sie bitte während des Installationsvorgangs die Treiberinstallation mit der "Enter"- oder "Return"-Taste auf Ihrer Tastatur.

Nach erfolgreichem Abschluss der Installation erscheint ein Symbol mit dem Namen "GlucoLog" auf Ihrem Desktop. Starten Sie GlucoLog, indem Sie das Symbol doppelt anklicken. Es erscheint nun folgende Oberfläche (siehe Abb. 3). (Hinweis: Bei älteren Systemen kann es beim ersten Start von GlucoLog zu einer kleinen Wartezeit kommen, da GlucoLog im Hintergrund Daten bereitstellt.)

lucoLog	
GlucoLog	E Hilfe Info Kontakt Impressum
AD Wather Patient	Aktualisieren
ID-Nummer 000000001 Erfassungsdatum 01/04/2009 Är	nderungsdatum 01/04/2009
Nachname	aburtadatum
Vorname Geschlecht M - Alter (T	T/MM/YYYY)
Patient hinzufügen	
Patient Initzurügen	
Persönliche Daten Klinische Daten Insulintherapie Zeitabschnitte	
Ort Land	1
E-Mail	
Bemerkungen	
© copyright - All rights reserved	

Abb. 3

Anlegen eines neuen Patienten

Nach dem ersten Start von GlucoLog ist noch kein Patient vorhanden. Klicken Sie deshalb nacheinander in folgende Felder und füllen diese entsprechend aus (siehe Abb. 3/Seite 3):

- "Nachname"
- "Vorname"
- Geschlecht"
- Geburtsdatum"

Das Feld "Alter" kann nicht ausgewählt werden, da es von der Software berechnet wird. Bestätigen Sie bitte Ihre Eingaben, indem Sie auf den "Ok"-Button klicken (siehe Abb. 4).

Hinzufügen eines Blutzuckermessgeräts

Fügen Sie dem neu angelegten Patienten ein oder mehrere Messgeräte hinzu, indem Sie aus der Liste "Gerät hinzufügen" (siehe Abb. 5) ein Messgerät auswählen und auf "Auswählen" klicken. Nun erscheint auf der linken Seite das ausgewählte Messgerät in der Liste "Blutzuckermessgeräte" (siehe Abb. 6/Seite 5).

Geben Sie nun die Seriennummer Ihres Messgeräts ein und achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben. (Hinweis: GlucoLog behandelt zwei Messgeräte, deren Seriennummern identisch sind, sich aber in der Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben unterscheiden, als zwei verschiedene Messgeräte!) Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie unten auf den "Ok"-Button klicken (siehe Abb. 4). GlucoLog wechselt automatisch zum Fenster "Datenübertragung" (siehe Abb. 7/Seite 5).

90						
X-10 H	Patient	-				Aktualisiere
ID-Nummer	00000001	Erfassungsdatum	01/04/2009	Änderungsdatum	01/04/2009	
Nachname	Mustermann			Caburtadatura		
Vorname	Max	Geschlecht M 🚽	Alter 26	(dd/MM/yyyy)	12/10/1982	
Patient ändern						
Blutzuckermes	sgeräte					-
	Geräteliste	*		Gerät hinzufüge	en	Â
			GL	UCOCARD G+ meter	Auswählen	► E
			Glu	ucoMen LX	Auswählen	•
			Glu	ucoMen LX	Auswählen	•
		-				-
٠		F.	*			



Abb. 5

	፟ኆ፝			
5.6	iii (
THE REAL	Patient	•		Aktualisiere
ID-Nummer	00000001	Erfassungsdatum 01	/04/2009 Änderungsdatur	m 01/04/2009
Nachname	lustermann			
Vorname [1ax (Geschlecht M 🚽	Alter 26 Geburtsdatum (dd/MM/yyyy)	12/10/1982
Patient ändern				
Blutzuckermessgerä	ite			
	Geräteliste	*	Gerät hinzu	fügen
GlucoMen I	X Seriennummer C08260	00183XL		
	and the second sec		GLUCOCARD G+ meter	Auswählen 🕨 🗏
Letzte Verv	/endung:	8	GLUCOCARD G+ meter	Auswählen 🕨 🗏
Letzte Verv	vendung:	8	GLUCOCARD G+ meter	Auswählen
Letzte Verv	vendung:	⊗	GLUCOCARD G+ meter	Auswählen 🕨 🖡
Letzte Verv	vendung:	⊗	GLUCOCARD G+ meter	Auswählen 🕨 🗄
Letzte Verv	vendung:	⊗	GLUCOCARD G+ meter	Auswählen > Auswählen >
Letzte Verv	vendung:	⊗	GLUCOCARD G+ meter	Auswählen > Auswählen > Auswählen >
Letzte Verv	vendung:	×	GLUCOCARD G+ meter	Auswählen Auswählen
Letzte Verv	vendung:	×	GLUCOCARD G+ meter	Auswählen
Letzte Verv	vendung:		GLUCOCARD G+ meter	Auswählen

Abb. 6

Auslesen der Daten Ihres Blutzuckermessgeräts

Stellen Sie sicher, dass Sie das passende Datenkabel zu Ihrem Blutzuckermessgerät ausgewählt haben. Verbinden Sie das Kabel nun mit Ihrem Computer. Es kann zu einer kurzen Wartezeit kommen, wenn Sie das Kabel das erste Mal mit Ihrem Computer verbinden, da Windows eventuell die Treiber für das Kabel automatisch installiert.

Verbinden Sie nun Ihr Messgerät mit dem Datenkabel. Klicken Sie im Feld "Datenübertragung" auf den "Start"-Button (siehe Abb. 7). Die Daten Ihres Messgeräts werden nun in Ihr

atum	Zeit	Ergebnis	Aktivität (Ereignis)			
13/02/2009	07.55.00	97	1.			
22/01/2009	20.30.00	209	*	100		
22/01/2009	20.25.00	100	1			1
2/01/2009	19.45.00	107	54 C	19 79		
				Ê 50		
				25		
			0			
				12/02	1	302
				Datenübertragu	ÞØ	
				GlucoMen LX Letzter Download		
					START	Nessgerät über passendes Kabel mit serieller Schnittstelle Ihres Computers verbinden. Nach dem Einschalten, START drücken.
					Report	Patientenergebnisse drucker ortieren 🐼 Exportieren

Tagebuch übertragen. Sobald die Datenübererfolgreich tragung abgeschlossen wurde, erhalten Sie die Bestätigungsmeldung "Übertragung erfolgreich!". Nun können Sie die Verbindung trennen und sogleich sämtliche Darstellungsmöglichkeiten Ihrer persönlichen Ergebnisse ausprobieren.

Abb. 7

Hilfe

Für ausführlichere Angaben bzgl. Funktion und Aufbereitung Ihrer Daten konsultieren Sie bitte die Hilfe-Funktion. Diese finden Sie, indem Sie im GlucoLog-Fenster rechts oben auf "Hilfe" klicken. In der Hilfe-Funktion können Sie sich entweder links durch die Liste von Begriffen klicken oder alternativ durch die Eingabe eines Stichworts unter "Suchen" direkt zum gewünschten Artikel navigieren.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Datenmanagementsystem GlucoLog!